

よもぎ温熱シート



お灸



10枚入り

¥3,000 (税別)

足の裏専用

使い捨てカイロです。

【商品の特徴】自動発熱で火のいらないお灸です。使いやすいサイズで簡単に自分で貼れます。6時間の持続時間で 40℃前後の温熱が施灸箇所にはがります。

【貼る場所】足の裏専用です。

【使用方法】開封して「ファオー キュー」を取り出し、のりの付いたシートを直接肌に貼ってください。もまないで下さい。

【貯蔵方法】直射日光を避け、涼しい所に保管して下さい。密封で保存して下さい。

【原材料名】鉄、水、食塩、吸水樹脂、蛭石、炭粉、もぐさ

【有効期間】二年間

※使い終わった後は、再利用しないでください。

足の裏以外は使用しないで下さい。

もぐさ入りの製造は全て国産です。

【日本製】

【使用上の注意】

「ファオー キュー」は足の裏専用です。他の場所での使用は「低温やけど」になるおそれがあります。また、熱さを強く感じなくても「低温やけど」になる場合がありますので十分注意してください。熱過ぎると感じた時はすぐにはがして下さい。皮膚の弱い方は靴下等の上からご使用ください。

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 打撲、捻挫等で患部に熱がある人。(2) 本品を自分ではがすことができない人。(3) 手や足に血行障害のある人。(4) 糖尿病の人。(熱さを感じにくいことがあり、低温やけどのおそれがあります)

2. 次の症状の方は使用しないでください。

(1) 足裏の湿疹、かぶれ、傷口。(4) くすりを塗った部位。

3. 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

4. 使用後、上記の症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

5. 一度使用したシートは再使用しないでください。

【その他の注意】

1. 発熱シートはもんだり、むりに折りまげたり、破ったりしないでください。

2. 万一、内容物が肌に直接ふれた場合は、濡れたタオル等でふきとるか、洗い流してください。

3. 本品を食べたり、なめたりしないでください。

4. 水などで濡らさないでください。入浴時などには必ずはがしてください。

【使用に際しての注意】

1. 布団や毛布、ストーブ、コタツの中など保温性の高い状態で使用すると、温度が上がり過ぎることがありますので、そのような状態では使用しないでください。

2. 熱すぎるなどの異常を感じたら、すぐにはがしてください。なお、その際低温やけど等を起こしていると皮ふがめくれることがあるので、ゆっくりとはがしてください。

3. 本品を貼ったまま移動などすると足の裏が圧迫され、低温やけどが起きやすくなりますので注意してください。また、シートがやぶれたりする場合がございますので、十分にご注意ください。

【取扱い上の注意】

1. 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。

2. 小児の手の届かない所に保管してください。

3. 外袋を開封すると発熱し、必要な時に発熱なくなるので、使用直前に開封してください。


4. 発熱シートは使用後、完全に冷えた事を確かめ、不燃性ゴミとして廃棄してください。使い捨てカイロです。市町村の区分に従ってお捨て下さい。

【包装】10枚(1枚/1袋×10袋)、1枚サイズ・9.5cm×7cm

品質には万全を期しておりますが、万一不良品がございましたら、お買い上げの月日、店名、外装をそえて弊社までお送りください。新しい製品とお取り替えます。

『よもぎシート』です！

『よもぎシート』はワオー・Q《よもぎ温熱シート（カイロ）》
以外にはご使用にならないください。

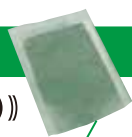

よもぎシート
(別売)

つかい方

よもぎ温熱シート（カイロ）




1 セロハンをはがします。



のり面

2 のり面によもぎシートを
貼ります

レーヨン100%のシートです

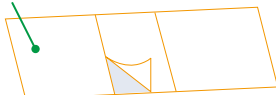


3 粘着シート（別売）のまん中の紙
をはがします。



両端の紙
をはがし
ます。

4 カイロの上によもぎシートをのせ、
粘着シートのまん中に貼ります。

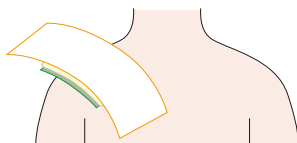


5 冷えや癒りのある箇所等へ
じかに肌に貼ってみてください。

※傷口には貼らないでください。 ※『よもぎシート』は、使い捨てです。


便利なツボ早見表

- ・冷え症のツボ ●
- ・首、肩のツボ ●
- ・腰痛のツボ ●
- ・便秘のツボ ●
- ・風邪のツボ ●
- ・疲労回復のツボ ♥

正面

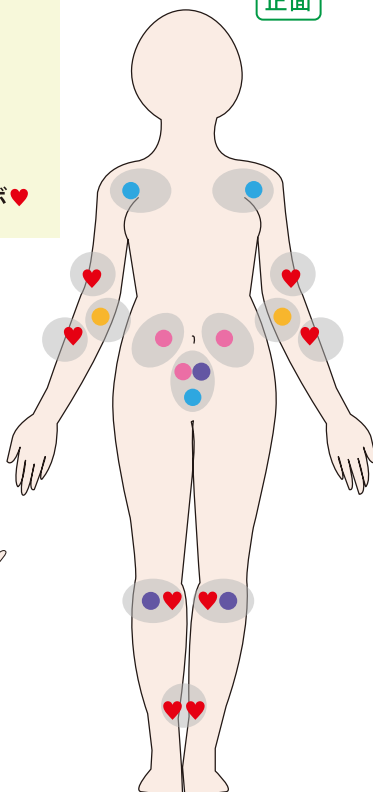

背面

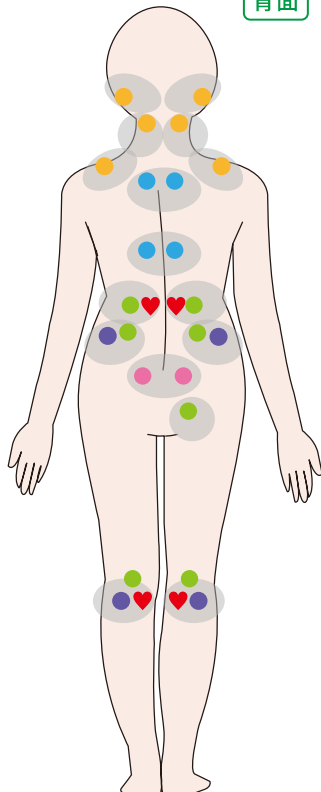

足の裏には、たくさんの
ツボがあります。

